


GUIDE RAPIDE ELECTROCARDIOGRAPHE PHILIPS TC10



AVF BIOMEDICAL

Intégrateur de solutions médicales


PHILIPS

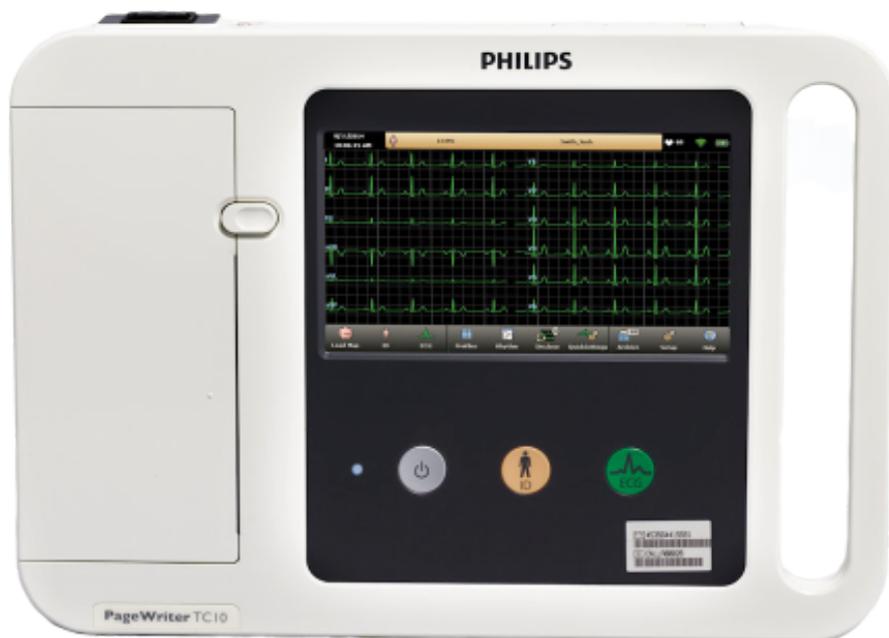

DOCUMENT RÉALISÉ PAR AVF BIOMEDICAL

WWW.AVF-BIOMEDICAL.COM

Après installation de la batterie et du câble ECG, allumer le système avec le bouton

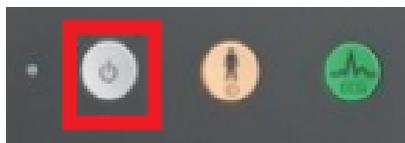

1 - Procédure pour un ECG :

1) Brancher les brins patients

2) Identifier le patient

3) Effectuer ECG et sauvegarder sur l'ECG

4) Pour transférer via une clé USB

- Aller sur **Archive** au niveau de l'écran principal (4-1)
- Sur l'onglet **destination transfert**, sélectionner **PDF vers USB** (4-2)
- Sélectionner l'ECG à transférer et appuyer sur **Transférer** en bas à droite

Pour transférer via le Réseau (4-3), à partir de l'étape 3 :

- Effectuer l'ECG et **transférer**

GUIDE RAPIDE ELECTROCARDIOPHIE TC10

