

# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS



**AVF BIOMEDICAL**  
Intégrateur de solutions médicales

## PHILIPS



DOCUMENT RÉALISÉ PAR AVF BIOMEDICAL

[WWW.AVF-BIOMEDICAL.COM](http://WWW.AVF-BIOMEDICAL.COM)

# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

POUR RÉALISER L'INSTALLATION DU  
SURESIGNS VS4, IL FAUT:




1 personne



20 minutes



**AVF BIOMEDICAL**  
Intégrateur de solutions médicales

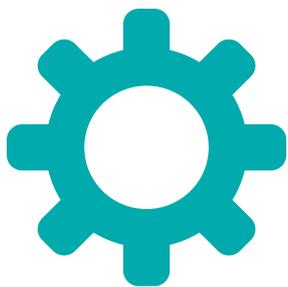

1 tournevis cruciforme




1 clé de 13"




# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

Le Suresigns VS4 est livré sous forme de deux cartons .

## Contenu du petit carton

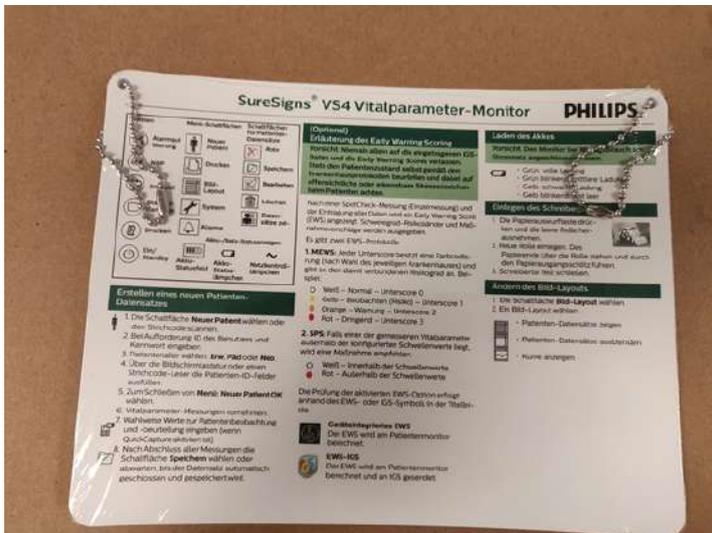


# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

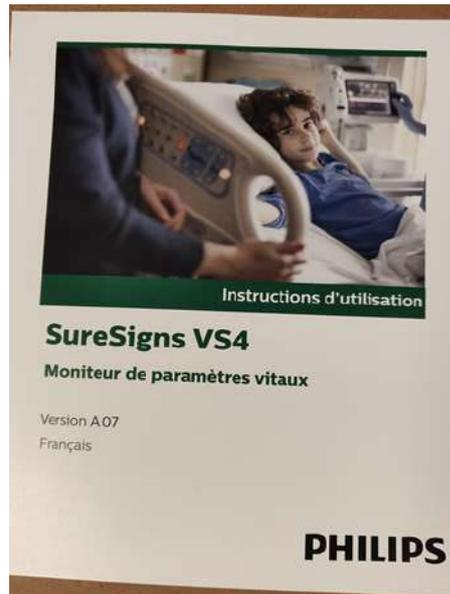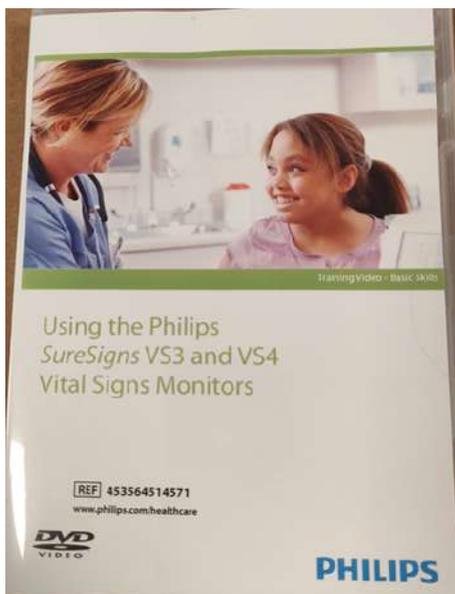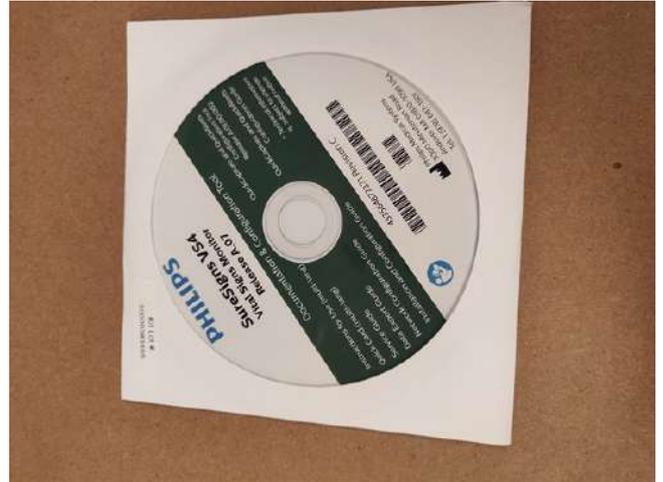

# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

## Contenu du grand carton

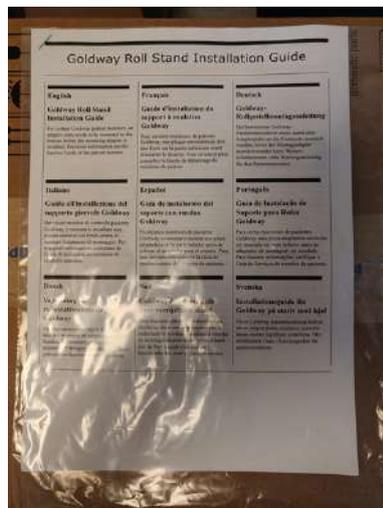

# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

## 1 - Le pied

**Etape 1:** Fixer les attaches sur le panier



**Etape 2:** Dévisser légèrement la poignée et la glisser le long du tube



Répéter la manipulation avec le panier



# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

**Remarque:** Ne fixez pas encore les accessoires, de manière à pouvoir les ajuster par la suite

**Etape 3:** Dévisser la vis en bas du tube et placer le pied à roulettes



Puis utiliser la clé de 13" pour serrer



# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

## 2 - Le moniteur

**Etape 4:** Prendre la plaque métallique sur le haut du pied en dévissant la vis juste en dessous ainsi que les vis qui sont scotchées



**Etape 5:** Visser la plaque métallique sur le moniteur




**Remarque:** Il faut que la partie bombée de la plaque métallique soit orientée vers le moniteur et les parties percées vers l'avant (écran) et l'arrière de l'appareil.

# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

**Etape 6:** Placer le moniteur sur le pied



Ajuster la poignée et le panier par rapport à l'écran et les fixer

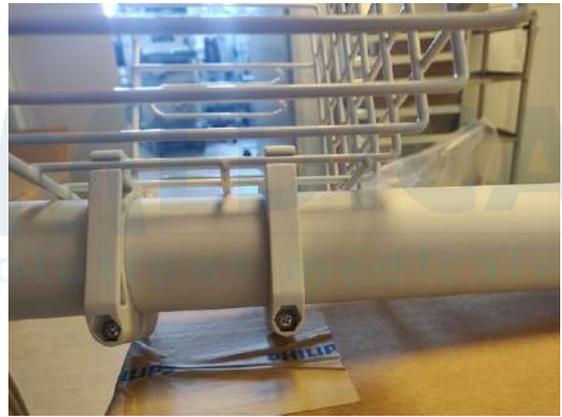

**Remarque:** Le panier doit être placé sous les instructions de sécurité



# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

## Etape 7: Placer les accessoires

### La batterie:



### Le capteur de SpO2:



# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS


## La tubulure et le brassard de tension:



## Le câble secteur:



## La notice d'installation simplifiée (choisir la langue):

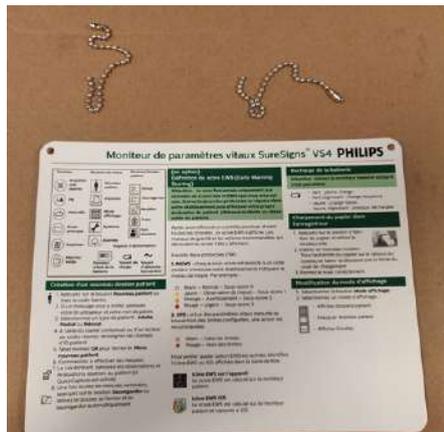



# NOTICE SIMPLIFIÉE D'INSTALLATION ET PARAMÉTRAGE DU SURESIGNS VS4 DE PHILIPS

## 3 - Le paramétrage

**Etape 8:** Brancher le moniteur, allumer l'appareil puis régler l'heure et la date



Aller dans les paramètres et choisir le format d'affichage de la date.

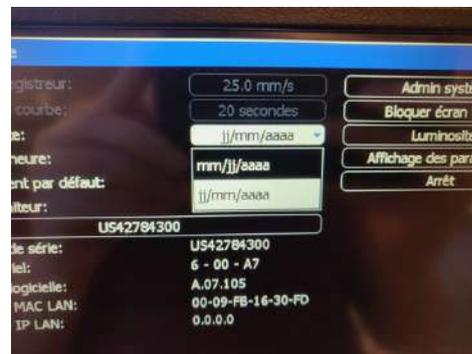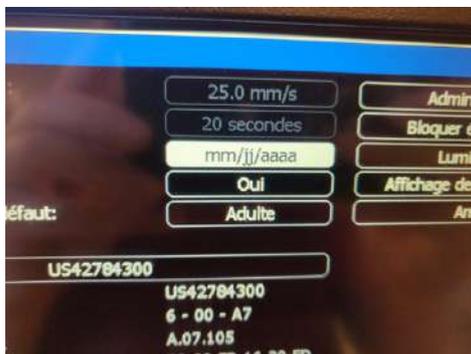

Pour terminer, retirer le plastique de protection de l'écran

